



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες του τεστ για να λάβετε ένα ακριβές αποτέλεσμα.

Μην φάτε ή πιείτε για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη του τεστ και μην χρησιμοποιήσετε προϊόντα στοματικής υγιεινής για 30 λεπτά πριν την έναρξη του τεστ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ακολουθείτε θεραπεία HIV μπορεί να λάβετε εσφαλμένο αποτέλεσμα. Δεν έχουν συλλεχθεί κλινικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του αυτοδιαγνωστικού τεστ OraQuick® HIV Self-Test σε άτομα υπό προληπτική αγωγή PrEP.



ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ
oraquick.com

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ORAQUICK® HIV SELF-TEST



ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ



Το κιτ περιέχει: **τεστ κιτ, βάση δοκιμής, οδηγίες χρήσης και σακούλα απόρριψης.** Αφαιρέστε τα παραπάνω αντικείμενα για να ξεκινήσετε το τεστ.



Το τεστ κιτ που έχετε περιέχει δύο σακουλάκια.



Ανοίξτε το σακουλάκι που περιέχει τον **σωλήνα.**



Αφαιρέστε το **πώμα.**




ΜΗΝ χώνετε το υγρό. **ΜΗΝ** πείτε.



Τοποθετήστε τον σωλήνα στη **βάση στήριξης.**




Ανοίξτε το σακουλάκι που περιέχει τη **συσκευή δοκιμής** και αφαιρέστε την. **ΜΗΝ** αγγίζετε το Στειλό με τα δάχτυλά σας. **ΜΗΝ** φάτε ή καταπιείτε το συντηρητικό.

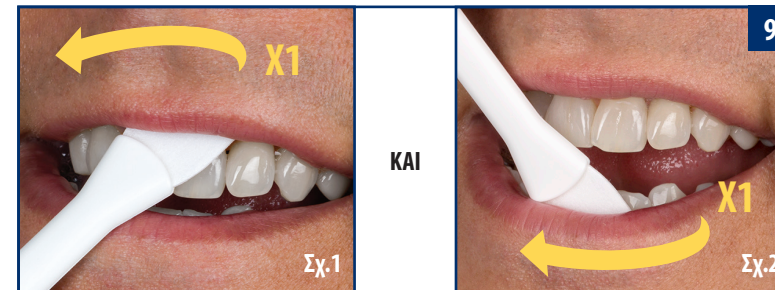

Πιέστε το **Στειλό** δυνατά πάνω στα ούλα σας και ταμπονάρτε κατά μήκος των **πάνω ούλων μια φορά** (σχ. 1) και **κατά μήκος των κάτω ούλων μια φορά** (σχ. 2).



Εισάγετε το **Στειλό** σε όλο το μήκος του σωλήνα μέχρι να αγγίξει τον πυθμένα.

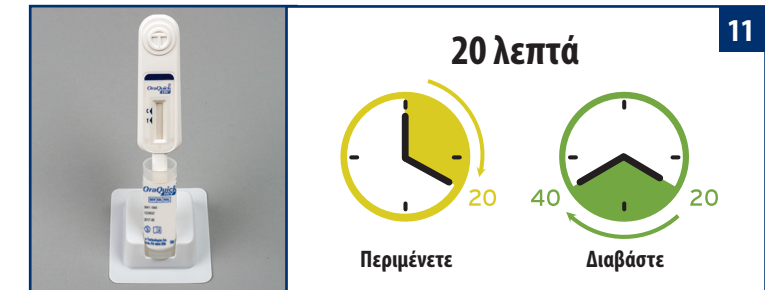

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΕΚΕΙ ΓΙΑ 20 ΛΕΠΤΑ προτού να διαβάσετε τα αποτελέσματα. **ΜΗΝ** διαβάζετε τα αποτελέσματα μετά από 40 λεπτά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαβάστε τα αποτελέσματα σε καλά φωτισμένο σημείο

ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ HIV



Δύο πλήρεις γραμμές, ακόμη κι αν η πρώτη είναι πιο σχρή, σημαίνει ότι δύναται να είστε **ΘΕΤΙΚΟΣ** στον HIV και πρέπει να αναζητήσετε επιπλέον τεστ από εκπαιδευμένους επαγγελματίες για να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση HIV.



Το γρηγορότερο δυνατόν...
Επισκεφθείτε το πλησιέστερο **Κέντρο Διάγνωσης HIV** ή **Υγειονομικό Κέντρο**

ΑΚΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



Αν δεν υπάρχει γραμμή δίπλα στο "C" (ακόμη κι αν υπάρχει γραμμή δίπλα στο "T"), η γραμμή του τεστ ή η γραμμή ελέγχου δεν είναι πλήρεις (κατά μήκος της οθόνης), ή ένα κόκκινο φόντο καθιστά αδύνατη την ανάγνωση του τεστ, το τεστ δεν λειτουργεί και πρέπει να επαναληφθεί. **Θα πρέπει να προμηθευτείτε άλλο τεστ.**



Το τεστ δεν λειτουργήσε κανονικά. Επισκεφθείτε το πλησιέστερο **Κέντρο Διάγνωσης HIV** ή **Υγειονομικό Κέντρο.**

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ HIV

ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 20 ΛΕΠΤΑ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ



ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ δίπλα στο "C" και ΚΑΜΙΑ γραμμή δίπλα στο "T", το αποτέλεσμα σας είναι **ΑΡΝΗΤΙΚΟ** HIV.

Να επιζητάτε τακτικές εξετάσεις. Αν είναι πιθανό να έχετε εκτεθεί στον HIV, εξεταστείτε ξανά σε 3 μήνες.

ΑΒΕΒΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Δεν γνωρίζετε το αποτέλεσμα σας ή είστε αβέβαιοι για το αποτέλεσμα σας. Επισκεφθείτε το πλησιέστερο **Κέντρο Διάγνωσης HIV** ή **Υγειονομικό Κέντρο.**

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αφαιρέστε το Στειλό, τοποθετήστε το πώμα στον δοκιμαστικό σωλήνα, βάλτε τα στην σακούλα απόρριψης που προσφέρεται και απορρίψτε όλα τα περιεχόμενα σε ένα κανονικό καλάθι σκουπίδιων.



