

B A L A N C E

Οδηγίες χρήσης

Πτυσσόμενο τραπέζι μασάζ Komfort Activ Fizjo 2 τμημάτων



Εισαγωγέας:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Πολωνία


www.activeshop.com.pl

Rev. A/09/2025



Σάρωση
για
διαφορετικ
ές γλώσσες

Κατασκευή

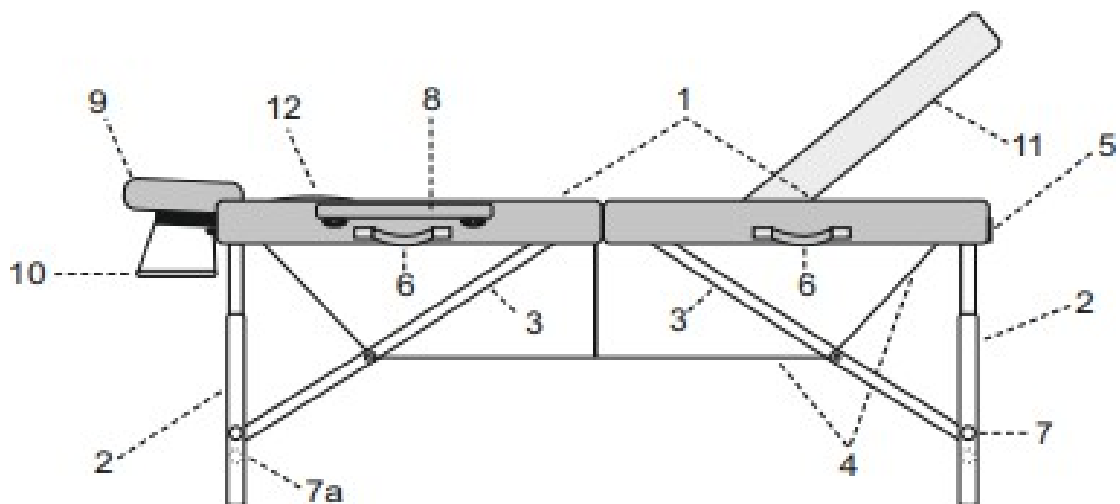

1. Επιτραπέζια επιφάνεια

2. Εξωτερικά πόδια

3. Αποστάτες εξωτερικών ποδιών

4. Τάνυση καλωδίων (σύστημα καλωδίων)

5. Κλείδωμα θήκης

6. Λαβές μεταφοράς

7. Παξιμάδια

7a. Πρόσθετο παξιμάδι

8. Υποβραχιόνια

9. Προσκέφαλο

10. Ράφι βραχιονα

11. Ανυψούμενη επιφάνεια τραπεζιού (μόνο σε τραπέζια 3 τμημάτων)

12. Στοπ κοπής προσώπου

Ρύθμιση ύψους


1	2	3	Stoly	Opis azynnosci
			Ξύλινο	<ol style="list-style-type: none"> Ξεβιδώστε τα παξιμάδια. Αφαιρέστε το κινητό πόδι από τις βίδες στερέωσης, επανατοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση.
			Αλουμίνιο	<ol style="list-style-type: none"> Πιέστε τον πείρο ασφάλισης. Μετακινήστε το κινητό πόδι στην επιθυμητή θέση. Τοποθετήστε την οπή στο μπουλόνι

Συναρμολόγηση:

1. Ανοίξτε το τραπέζι και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το τραπέζι.



2. Τοποθετήστε τα μπράτσα.

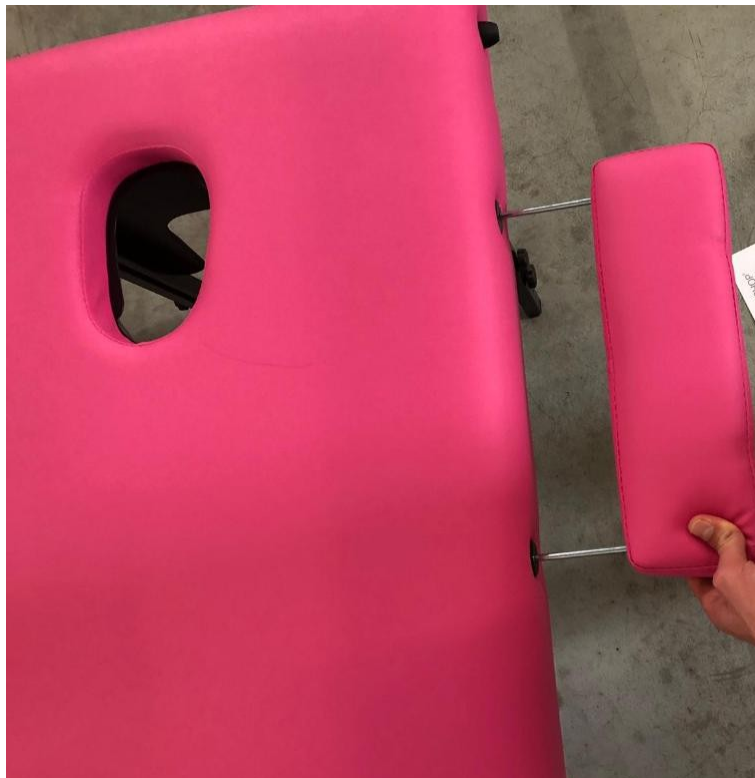

3. Κολλήστε το μαξιλάρι στο προσκέφαλο με Velcro.



4. Σύρετε το προσκέφαλο στις οπές όπως φαίνεται στην εικόνα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το μάνταλο για να το ασφαλίσετε στην επιθυμητή θέση.



Κλιπ

Προσοχή!

Πριν τοποθετήσετε τον ασθενή, βεβαιωθείτε ότι τα εξωτερικά πόδια έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και σωστά τεντωμένα.

Καθαρισμός και συντήρηση:

Καθαρίστε τις επιφάνειες από ξύλο ή κόντρα πλακέ με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά. Δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών ουσιών.

Προσοχή!

Το ξύλο ως φυσικό υλικό μπορεί να χαρακτηρίζεται από διαφορές στους κόκκους, στις χρωματικές αποχρώσεις και στην παρουσία φυσικών στοιχείων, όπως ραβδώσεις ή κουκίδες. Αυτά δεν αποτελούν ελαττώματα του προϊόντος - αντίθετα, μαρτυρούν την αυθεντικότητα και τη φυσική του προέλευση. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν συνιστούν λόγο καταγγελίας.

Προσοχή!

1. Το τραπέζι προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2. Απαγορεύεται η αλλαγή της θέσης του τραπεζιού όταν αυτό βρίσκεται υπό φορτίο.
3. Απαγορεύεται το απότομο άλμα πάνω στο τραπέζι.
4. Το τραπέζι μπορεί να μεταφερθεί διπλωμένο με ασφαλισμένη την κλειδαριά.
5. Απαγορεύεται να κάθεστε, να γονατίζετε ή να ακουμπάτε στο μαξιλάρι, στα ράφια και στα μπράτσα.
6. Δώστε προσοχή στην ευθυγράμμιση των καλωδίων κατά την αναδίπλωση του τραπεζιού. Μην κουμπώνετε τα καλώδια.
7. Το τραπέζι πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από άμεσες πηγές φωτιάς και θερμότητας.
8. Η ζημία που προκαλείται από τη μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε ινστιτούτα αισθητικής. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητες συνέπειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ούτε να επιχειρείται η χρήση της για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όλα τα σέρβις και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά, σε υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - έτσι ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν υγρά στη συσκευή.
4. Αφαιρέστε αμέσως το φιλ από την πρίζα και επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη εταιρεία σέρβις ACTIVESHOP Sp. z o.o. στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή αναδίδει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κάθε φορά που ολοκληρώνετε την εργασία σας με τη μονάδα.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να τηρείτε ένα διάστημα ενός λεπτού πριν πατήσετε ξανά το κουμπί λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Η παροχή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να δυσλειτουργήσει, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι θα αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τον εξοπλισμό, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για να παίζουν με αυτόν τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η λανθασμένη χρήση ή επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, γι' αυτό η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μακριά από παιδιά.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος περιβάλλοντος σύμφωνα με οδηγία 2012/19/EK σχετικά με απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγεται χωριστά και να παραδίδεται στα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι συσκευές τέλους κύκλου ζωής και οι παλιές συσκευές περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και επομένως πρέπει να αποστέλλονται για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην ACTIVESHOP ΕΠΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.